

使用說明書



Ultra line



www.facebook.com/motifequipment

MOTIF Beauty Hong kong equipment LTD

焯絲 - 香港美容儀器有限公司

MOTIF[®]

原理

Ultra Line是結合超聲波以及單極射頻,以超聲波的規率性震動 瞬間擴張皮膚細胞的管道,環迴立體傳送射頻能量直達膠原層底部,激活膠原蛋白及彈力蛋白增生,令面部輪廓緊緻提升。

效果

1. 可全面提升膚質，收細毛孔，增加彈性等
2. 收緊鬆弛肌膚，減淡皺紋細紋
3. 改善下垂眼周皮膚及腮線模糊，提拉雙下巴及包包臉
4. 補充膠原蛋白，收縮並拉緊，令面部豐盈飽滿

針對問題

- 1.5mm :針對淺層真皮層增加膠原蛋白及彈力蛋白,改善膚色暗啞令皮膚變得更細緻有光澤。
- 3mm :針對深層真皮層,緊緻並提升肌膚彈性,撫平皺紋幼紋,改善毛孔粗大等皮膚問題。
- 4.5mm :針對SMAS筋膜層,收緊SMAS層時,改善肌膚底層承托力,會連同肌肉,皮膚等一併拉緊,緊緻及提升整個輪廓。

優勢

- 即時見效,效果可維持3年
- 無痛,無傷口,無副作用
- 無恢復期

注意

本產品必須嚴格按照說明書的使用方法,亂用誤用說明書以外的方法,而導致的一切後果,公司不承擔任何責任。

製造商的責任

本公司僅在下列情況下才認為應對儀器的安全性、可靠性的性能負責

即:裝配操作、重調、改進和維修均由本公司認可的人員進行。

警告

這是一種高能量聚焦儀器。

貴公司負有使用此儀器的責任—不能實現一套滿意的操作方案，則會造成不正常的儀器失效,本公司有提供列表說明校準方法以及其它資訊，以說明使用者由適當的合格的技術人員來維修那些本公司歸類可由使用者維修的儀器部分。



1.5mm (面部) 皮下塑形



3.0mm (面部) 膠原層



4.5mm (面部) 筋膜層

官方標配的配件頭一共有圖示的三個，用於做臉部的（1.5/3.0/4.5）。需要配身體探頭的需與原廠家聯繫





此按鍵(左)只在給客戶操作的時候使用，
更換探頭的時候不需要按住此按鍵！

安裝探頭的時候需要把孔位對齊



3、儀器介面操作

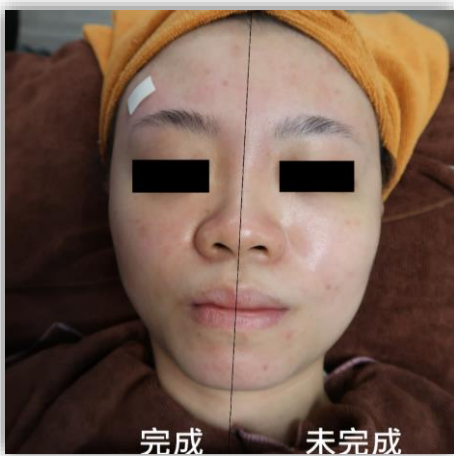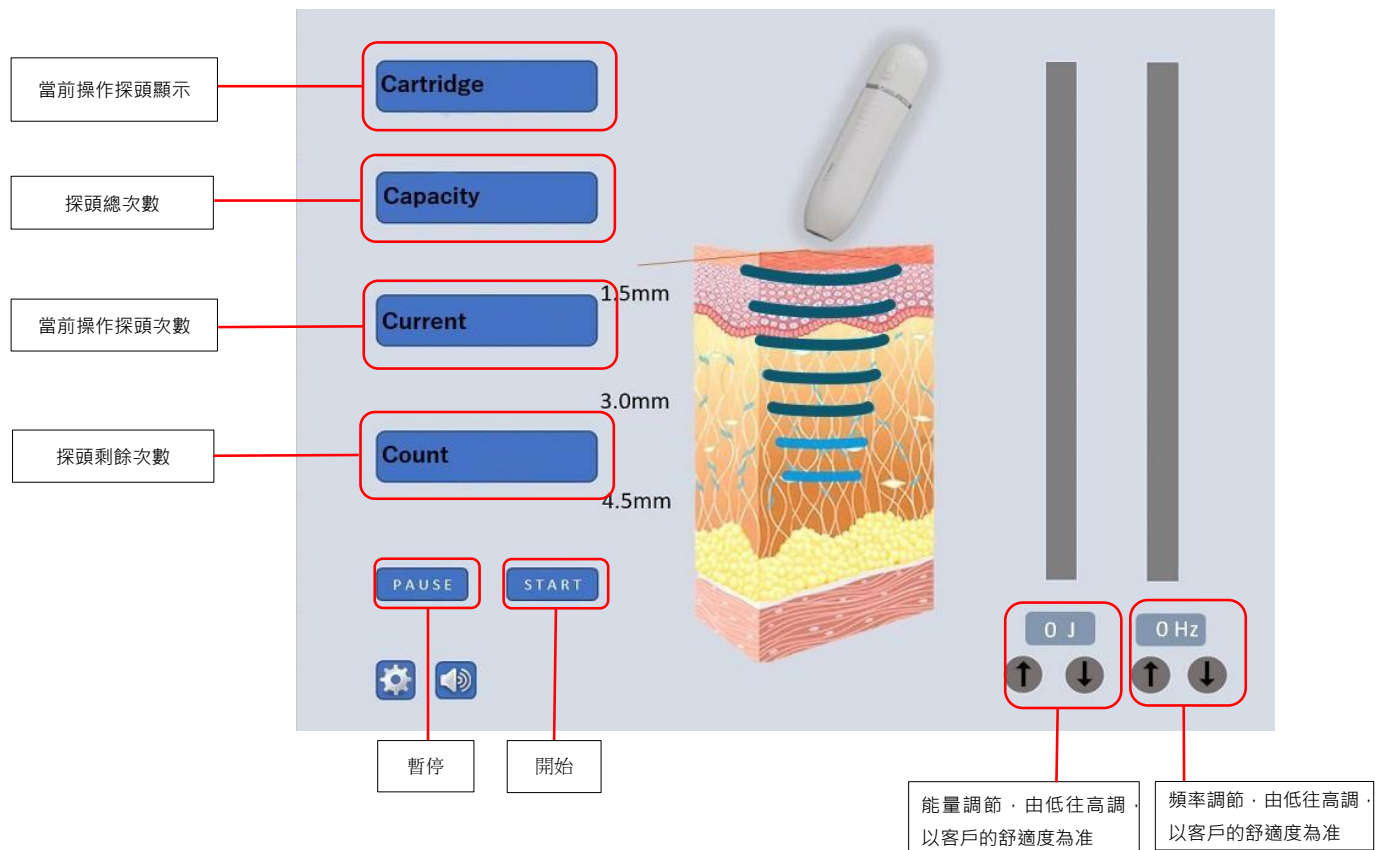

操作參數表

探頭	治療範圍	能量	頻率	備註	轉數
4.5 mm	筋膜層	5 J起	9HZ	操作於面部沒有碰骨的位置,避頸部位置	3
3.0 mm	膠原層	5 J起	9HZ	操作於面部眼下的位置,避頸部位置	3
1.5mm	皮下塑形	4 J起	9HZ	可全面操作,避開眼及頸部位置	3

***操作時必須按客人皮膚情況進行能量調節,此度數只為安全度數


使用步驟

- 1.清除所以化妝品
- 2.清潔皮膚。
- 3.插好儀器電源，打開電源開關，此時操作面板上的指示燈都會亮起
- 4.輸入客戶姓名,客號號碼及操作員
- 5.為客人在臉上畫上分區.
- 6.塗上骨膠原凝膠,套上適用的頭,在客人臉上試感覺(度數開始為0.2J)
- 7.操作過程中可了解客人的接受程度而向上調高能量.
- 8.完成後使用制冷儀器為客人導入骨膠原.
- 9.為客人使用面膜15分鐘

4.5頭操作注意事項

避忌


- ① 太陽穴(三叉神經)，誤打可完導致頭痛，可持續數星期
- ② 法令紋位置神經可導致面癱
- ③ 喉嚨有機會導致咳血

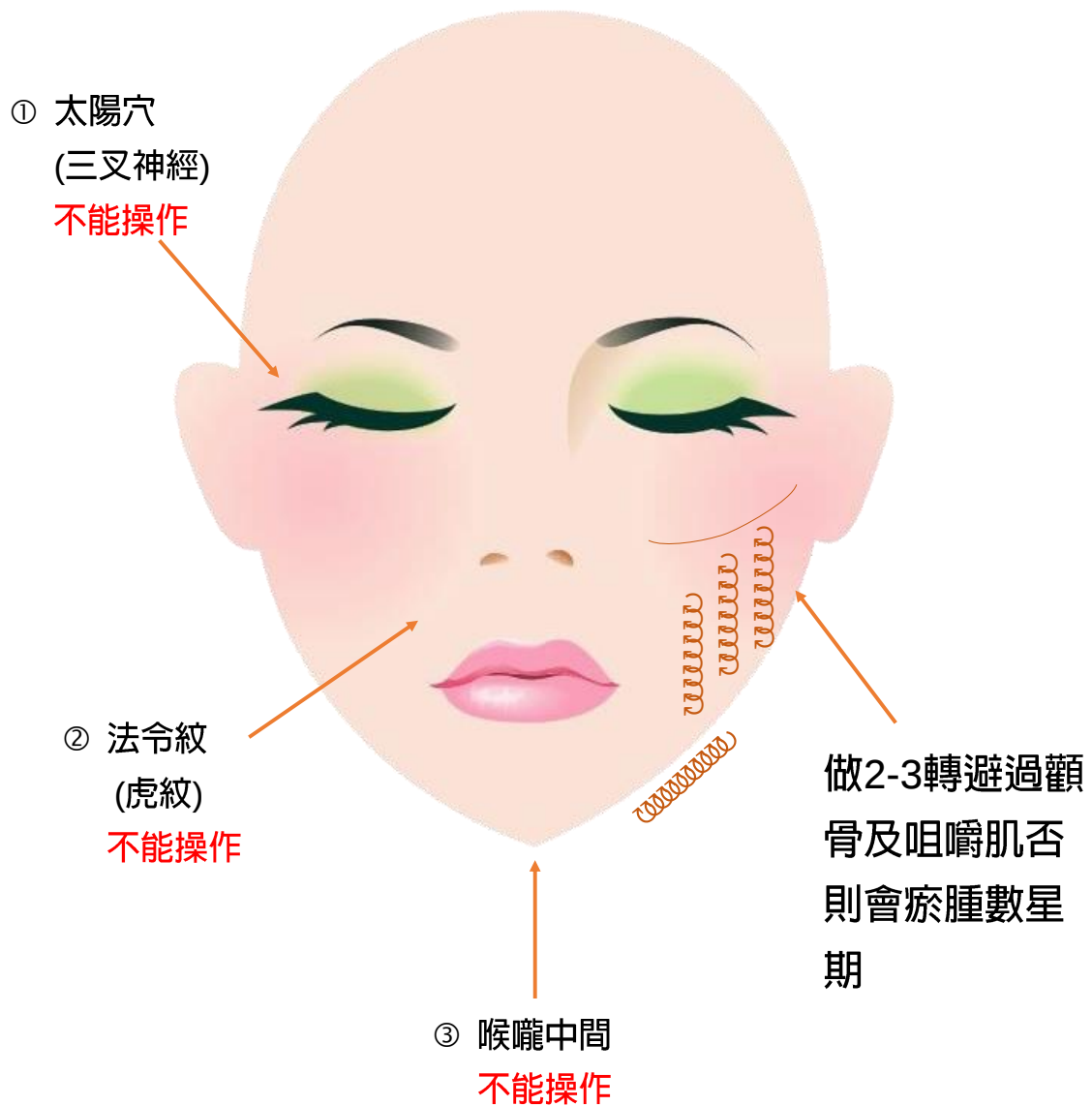

3.0頭操作注意事項

避忌


- ① 太陽穴(三叉神經)，誤打可完導致頭痛，可持續數星期
- ② 法令紋位置神經可導致面癱
- ③ 喉嚨有機會導致咳血
- ④ 太貼眼球或淚溝位置，有機會引致白內障

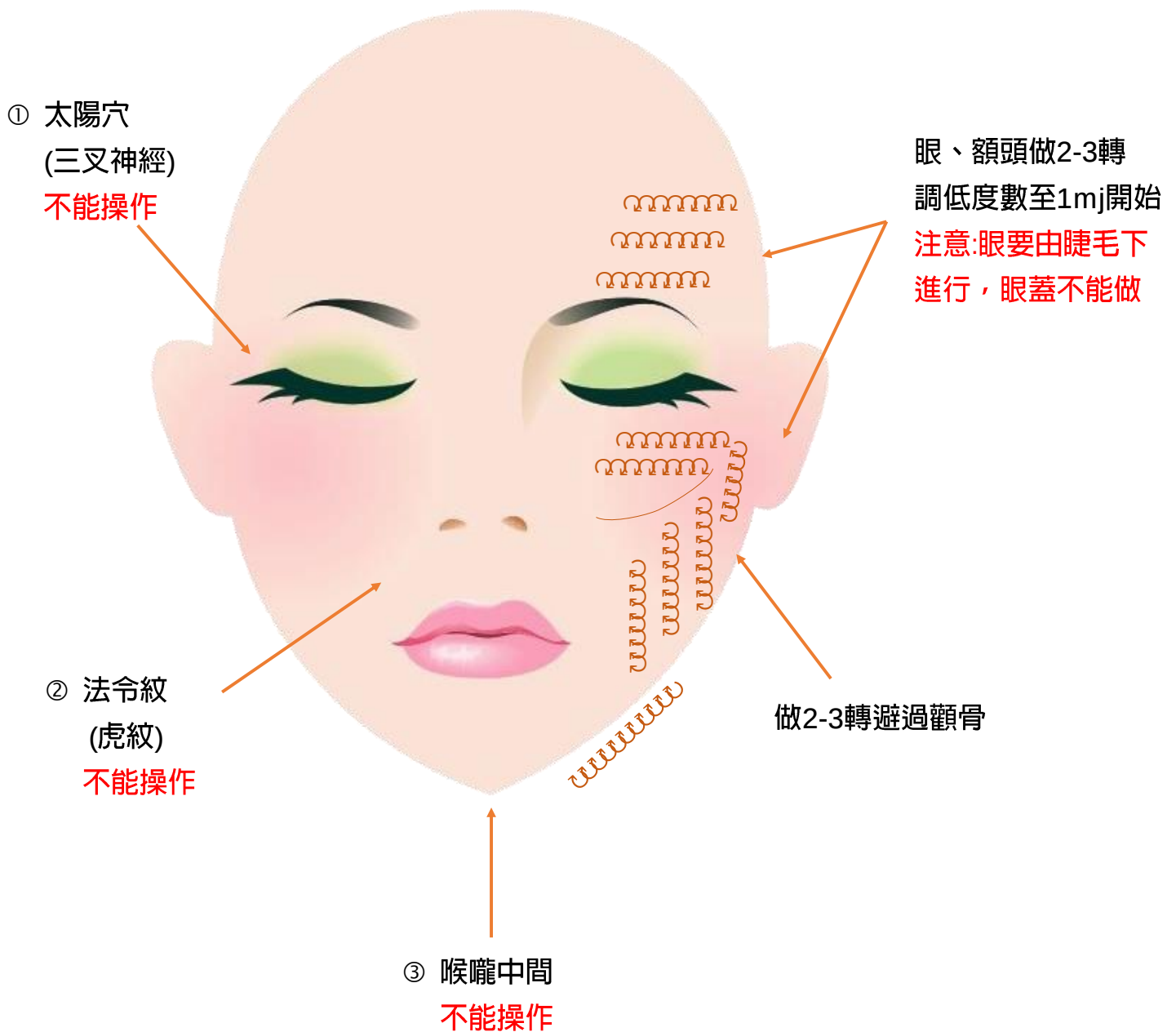

1.5頭操作注意事項

避忌

- ① 太陽穴(三叉神經)，誤打可完導致頭痛，可持續數星期
- ② 法令紋位置神經可導致面癱
- ③ 喉嚨有機會導致咳血
- ④ 太貼眼球或淚溝位置，有機會引致白內障

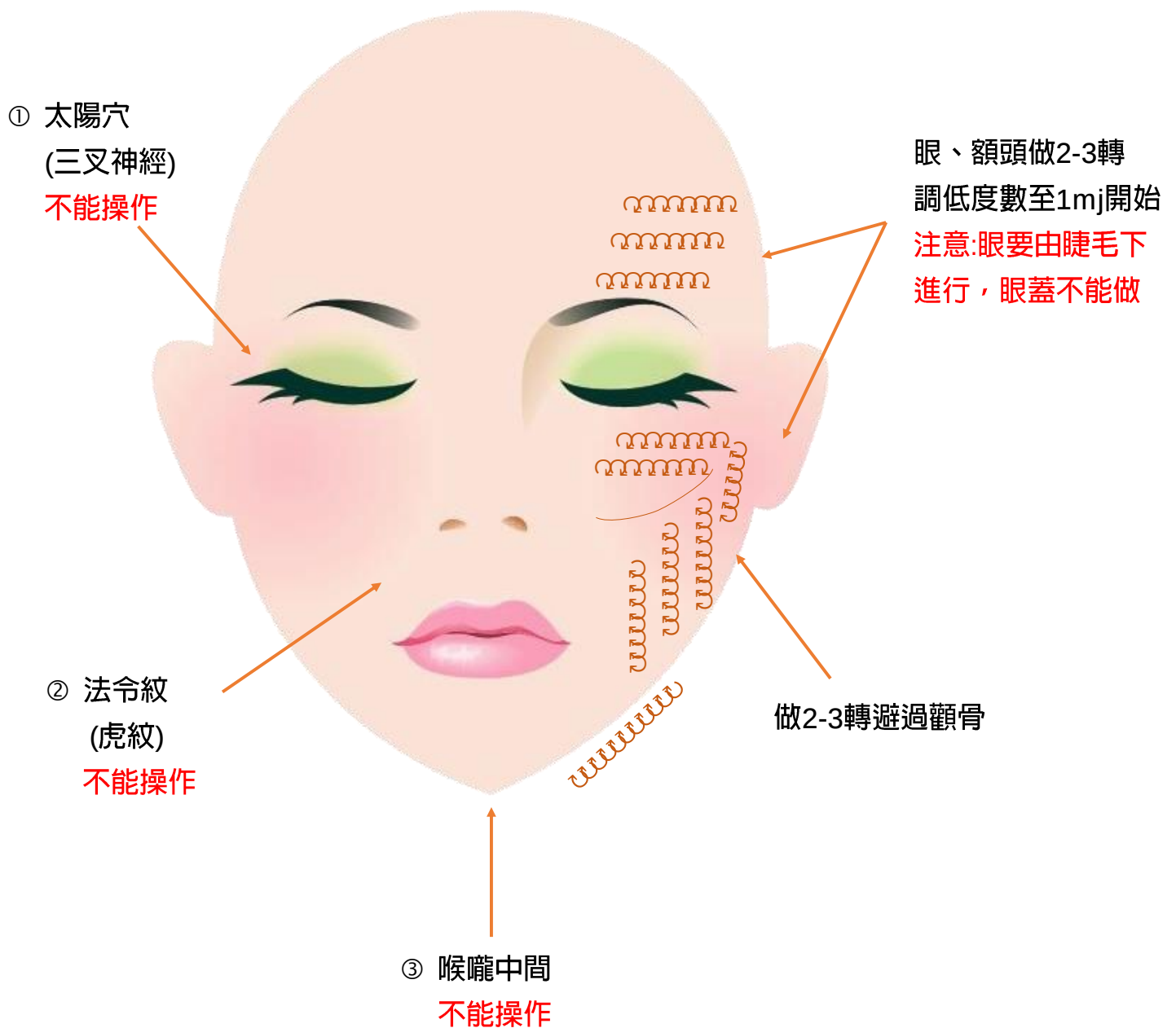

禁忌

- 1.額頭部位,禁止操作
- 2.操作時間同一部位禁止停留2秒以上
- 3.操作時一定要避開眼球部位
- 4.額頭,甲狀腺,耳朵下方到顎下等神經經過的地方不可操作
- 5.禁止使用在皮膚以外的物體上,探頭可能會出現故障
- 6.心臟病,孕婦,糖尿病等患者避免操作
- 7.牙齒或者牙齒周圍的部位，種植牙齒，有可能會出現牙齒冷痛這時可以吸氣讓嘴巴鼓起來或者用紗布包裹牙齒後操作。
- 8.治療身體時，神經經過的地方，請不要操作

不適宜人群

- 1、體內植入心臟起搏器或其他相似電子裝置的人。
- 2、懷孕的女性。
- 3、過去9個月內服用口服異維甲酸治療的人(Accutane / Roaccutane / Oratane)。
- 4、內部有填充物，若面部有金絲植入，不建議做。
- 5、嚴重心臟病、糖尿病、甲亢患者。
- 6、手術傷口未癒合者。
- 7、腫瘤晚期患者。
- 8、對效果抱有不切實際幻想者。

注意事項

- 1.使用之前保持皮膚、毛髮部位清潔衛生，去除面部所有化妝品
- 2.操作後三天不能用刺激性的保養品，做完後皮膚會有乾渴，要注意保濕
- 3.三天內請勿用熱水洗臉
- 4.一個月內不要去高溫桑拿、瑜伽等高溫環境，並且不能暴曬

保養和維修

日常檢查

- 1.電源插座是否與地有可靠的連接，沒有請更換電源插座
- 2.電源電線是否變形、斷裂、斷線:通過肉眼檢查，電線是否有變質、變形，如果有的情況下，可能會因漏電而引起火災。請立即更換新的電源線。
- 3.控制手柄是否有異常、斷線:通過肉眼檢查，輸出線是否有變質、變形，如有請立即更換
- 4.請檢查儀器使用前提示內容是否正確，不正確請停止使用

清潔與護理

清洗探頭和手柄機頭

注：探頭的包裝是防靜電包裝，請勿觸摸芯片。

由於探頭會在患者的皮膚接觸，清潔探頭請使用70%異丙基酒精
消你也可以使用一個標準的70%異丙醇酒精棉片輕輕擦拭探頭和
電纜。無論是探頭還是手柄都需要保持乾淨、乾燥。擦拭完後把探頭
放回它原來的包裝內方便下次使用。

警告：僅使用以上清潔方式清潔。不要使用丙酮或其他溶劑，因為這樣會損壞探頭或其他部件。

警告

維修本機須與本公司聯繫，勿擅自修理，自行拆封，本公司不予保修。

責任

購買者、操作使用者不按說明書操作使用的，不按安全注意事項、警示性說明使用的。

本公司承擔在保養期內發生的製造品質問題，將不會免費為用戶維修

配件的更換

配件需更換時必須從本公司購買。

安全事項

1、搬運安全

本操作系統內存精密儀器，用戶盡量不要遠距離移動此機器。運輸過程中必須使用原廠提供的減震包裝，否則可能導致系統的失調，影響能量輸出

2、電氣安全

本操作系統使用單相220V 電源，最大輸出電流不大於5A。
為了使機器使用壽命加長，減少電網波動對本機器的影響，用戶需使用500W 的穩壓器。

3、操作安全

隨時保持系統清潔並確保冷凝劑不污染系統

4、系統安全裝置

為了保證使用安全，本產品嚴格執行 (光電)企業標準
開機後立即檢查電路是否安全，並且整個操作過程中應不斷檢查電路

輸出功率	10-200W
治療探頭	1.5MM / 3.0MM / 4.5MM
輸入電壓	AC 220V
儀器尺寸	37CM*44CM*107CM